

## TOURNIQUET PER EMOSTASI CON CHIUSURA IN METALLO

**Ref. 9524.02.XXX**



### Descrizione

Tourniquet per emostasi in tessuto elasticizzato con chiusura in metallo.

Tourniquet utilizzabile con una sola mano. Nessun fastidio alla pelle durante l'applicazione.

Privo di componenti in lattice. Fascia lavabile e sostituibile.

Disponibile in diversi colori secondo i codici elencati in tabella:

9524.02.001	Tourniquet per emostasi in tessuto elasticizzato con chiusura in metallo – Menta
9524.02.002	Tourniquet per emostasi in tessuto elasticizzato con chiusura in metallo – Rosa
9524.02.008	Tourniquet per emostasi in tessuto elasticizzato con chiusura in metallo – Verde
9524.02.016	Tourniquet per emostasi in tessuto elasticizzato con chiusura in metallo – Rosso
9524.02.017	Tourniquet per emostasi in tessuto elasticizzato con chiusura in metallo - Blu

### Destinazione d'uso

Tourniquet per emostasi utilizzato per il blocco momentaneo della circolazione sanguigna in un distretto corporeo in condizioni di emergenza oppure per favorire la visibilità dei vasi per il prelievo ematico o l'infusione di sostanze.

## Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	V9003	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	Ref. 9524.02.001 Ref. 9524.02.002 Ref. 9524.02.008 Ref. 9524.02.016 Ref. 9524.02.017	1623630/R 1623646/R 1623649/R 1623651/R 1623653/R
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	1996 (Intermed)	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	F. Bosch GmbH & Co. KG	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

## Materiali

Fascia	Poliammide con Lycra
Fibbia	Metallo
Ftalati	Non presenti

## Dimensioni

Tourniquet per adulti	Lunghezza x larghezza x spessore: 50 cm x 2,5 cm x 3 mm
-----------------------	---

### Informazioni utili\*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Applicare il tourniquet su cute integra. Non applicare il tourniquet su cute lesa o alterata.
CONSERVAZIONE	Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Fascia lavabile a mano con acqua e detergente non aggressivo né schiumoso a 40°C. Risciacquare almeno due volte con acqua tiepida. Se il tourniquet è contaminato con sangue, secrezioni o altri fluidi biologici, smaltire immediatamente il dispositivo.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di rifiuti sanitari.

\*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni fornite dal fabbricante.

### Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
9524.02.XXX**	Tourniquet per emostasi con chiusura in metallo.	1

\*\*La confezione contiene un tourniquet per emostasi del colore scelto secondo il codice definito.

### Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2016	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
2.0	03/11/2016	Modifica al layout delle tabelle di identificazione e caratteristiche tecniche di prodotto; aggiunta simbolo CE.

