



Via Ludovico D'Aragona 11
20132 Milano (MI) - Italy
Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361
www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it

SCHEDA TECNICA

CALZATURA FISIOLÓGICA ACTIVA 4M

Rev. 01

Giugno 2015

Codice	Misura
A4M-35	35
A4M-36	36
A4M-37	37
A4M-38	38
A4M-39	39
A4M-40	40
A4M-41	41
A4M-42	42

Codice	Misur
A4M-43	43
A4M-44	44
A4M-45	45
A4M-46	46
A4M-4748	47-48
A4M-4950	49-50

Indicazioni Terapeutiche

Calzatura fisiologica indicata per: Alluce valgo, Dita martello, Metatarsalgie, Vasculopatie, Piede reumatico
Piede diabetico (ACTIVA S RIGID+ plantare personalizzato)

Descrizione

Calzatura unisex con ampia apertura superiore per favorire la calzatura e con chiusura a velcro regolabile e punta aperta

Tomaia in cotone microforato colore blu.

Contrafforte semirigido termoformabile e personalizzabile dal tecnico ortopedico.

Sottopiede estraibile in spugna super-soft alto 10 mm

Suola con struttura monoblocco in miscela assorbì-urto e antiscivolo.

Tomaia ancorata alla suola con collante a base di acqua (privo di solventi chimici) e con cucitura di tenuta sul bordo suola.

Predisposta per l'inserimento di un plantare estraibile o di plantari personalizzati, realizzati per il trattamento di alterazioni della morfologia del piede o per la prevenzione delle algie plantari.

Disponibili a richiesta due taglie Extra-Large (47-48 e 49-50)

Accessori opzionali: Activa SP, Activa S Rigid (Soletta rigida)

Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Sicurezza

La calzatura è realizzata con materiali privi di lattice e in conformità alla Direttiva RoHS 2002/95/CE.

In particolare non sono presenti le seguenti sostanze chimiche:

PBB – Polibromobifenili

PBDE – Polibromobifenileteri

Piombo e suoi composti

Composti del Cromo Esavalente

Mercurio e suoi composti

Pulizia

Non lavare la calzatura per immersione, direttamente sotto il getto dell'acqua o in lavatrice.

Lavare con acqua tiepida, massimo 40 °C, e sapone neutro. Sono preferibili detersivi ad alta biodegradabilità. Non utilizzare prodotti aggressivi e sgrassanti (alcol, detersivi per bucato, candeggina, ammoniaca e solventi).



Via Ludovico D'Aragona 11
20132 Milano (MI) - Italy
Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361
www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it

SCHEDA TECNICA

CALZATURA FISIOLÓGICA ACTIVA 4M

Rev. 01

Giugno 2015

Evitare materiali abrasivi quali spazzole lana d'acciaio, carta vetrata e lame metalliche per l'eliminazione di eventuali macchie.

Non asciugare la calzatura umida o bagnata direttamente con fonti di calore che potrebbero comportare danni alla stessa.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Smaltimento

I materiali utilizzati per la fabbricazione della calzatura sono di tipo parzialmente ecologico.

Pertanto devono essere smaltiti in accordo alle normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata. Si raccomanda di non disperdere il prodotto nell'ambiente.

Produttore

INTERMED S.r.l.
Via Ludovico D'Aragona 11
20132 - Milano (MI)



Codice CND **Y063303**
N. Repertorio

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CE