

**GINOCCHIERA CON ANELLO
E FORO ROTULEO**

Misura	Codice
S	GN-002S
M	GN-002M
L	GN-002L
XL	GN-002XL

**Indicazioni**

- Distorsioni lievi e postumi di traumi distorsivi.
- Sindrome rotulea.
- Lassità legamentosa leggera.

Descrizione

- Ginocchiera tubolare realizzata in neoprene con stabilizzatore rotuleo.
- Doppia cinghia di stabilizzazione in nylon con sistema di chiusura a velcro.
- Doppie stecche a spirale laterali non estraibili per coadiuvare il movimento dell'articolazione.
- Parte posteriore in tessuto a maglia aperta per una maggiore traspirabilità.

Controindicazioni ed avvertenze

- Le indicazioni terapeutiche riportate non costituiscono, ovviamente, elenco esaustivo. Per ulteriori e più specifiche indicazioni fare sempre riferimento a valutazione del medico specialista.
- Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. In caso di reazioni allergiche, rivolgersi immediatamente al proprio medico curante.
- Il dispositivo medico deve essere impiegato a seguito di valutazione clinica effettuata da un medico specialista il quale, dopo la diagnosi, individuerà la misura e gli eventuali adattamenti nel rispetto delle caratteristiche morfologiche dell'arto del paziente. Tali adattamenti e la successiva applicazione della ginocchiera devono avvenire a cura di personale tecnico specializzato.
- Si raccomanda di verificare con regolarità l'integrità della ginocchiera, la tenuta dei sistemi di chiusura ed il corretto funzionamento delle stecche a spirale. Su indicazione ed a parere del medico specialista, effettuare controlli periodici per la verifica dell'efficacia funzionale della ginocchiera.
- Si sconsiglia, per motivi di igiene ed efficacia terapeutica, il riutilizzo del tutore su altri pazienti.



Via della Pace, 21
20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy
Tel. +39-02-98248016
Fax. +39-02-98247361

SCHEDA TECNICA

Rev 00

Luglio 2013

GINOCCHIERA CON ANELLO E FORO ROTULEO

Materiali componenti

Tessuto tubolare	Neoprene
Tessuto a maglia aperta	Poliestere
Cinghie e chiusure	Nylon
Stecche	Metallo
Alloggiamenti stecche	Poliestere
Fibbie	Poliossimetilene
Stabilizzatore rotuleo	Gomma

Il neoprene contiene lattice.

Dati tecnici

Modello	Circonferenza min-max		Lunghezza
	Coscia	Polpaccio	
GN-002S	390-470 mm	290-370 mm	310 mm
GN-002M	470-530 mm	370-430 mm	310 mm
GN-002L	530-600 mm	430-500 mm	310 mm
GN-002XL	600-670 mm	500-570 mm	310 mm

Modalità di lavaggio



Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Confezione 1 pezzo

Garanzia

Il dispositivo è coperto da garanzia di due anni per difetti di fabbricazione. La garanzia non comprende eventuali anomalie derivanti da utilizzo non idoneo. La garanzia non si applica in caso di riparazioni non autorizzate dal fabbricante ovvero nel caso di parti o componenti soggetti ad usura.

Produttore INTERMED srl

Codice CND Y061209

N. Repertorio
GN-002S 987471/R
GN-002M 987506/R
GN-002L 987507/R
GN-002XL 987508/R

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE