

STETOFONENDOSCOPIO TIPO RAPPAPORT

Ref. LF-302-X



L'immagine del dispositivo è puramente indicativa.

Descrizione

Stetofonendoscopio per utilizzo universale.

Convertibile in 5 diversi modi:

- diaframma largo toni cardiaci nei pazienti adulti ;
- diaframma piccolo toni cardiaci in ambito pediatrico;
- campana grande frequenze basse, murmuri e soffi nei pazienti adulti;
- campana media frequenze basse, murmuri e soffi nei piccoli spazi (es. intercostali);
- campana piccola frequenze basse, murmuri e soffi in ambito pediatrico.

Realizzato con materiali privi di lattice.

Sistema a doppio tubo indipendente.

Archetto auricolare in zinco cromato.

Olive auricolari morbide e rigide ad avvitamento.

Disponibile nei colori come indicato in tabella:

| Codice prodotto | Colore |
|-----------------|-----------|
| LF-302-A | Arancione |
| LF-302-B | Blu |
| LF-302-N | Nero |
| LF-302-R | Rosso |
| LF-302-V | Verde |

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Destinazione d'uso

Fonendoscopio per l'auscultazione di suoni proveniente dagli organi del corpo umano, in ambito medico ospedaliero e privato.

Identificazione prodotto

| | | |
|---|--|--|
| Dispositivo Medico | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Codice CND | C9005 | |
| Identificativo di Registrazione BD/RDM | 14875/R | |
| Conformità alla Direttiva Europea 93/42/CEE (s.m.i. 2007/47/CE) | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE | <input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III | |
| Marcatura CE | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Dichiarazione di Conformità del Fabbricante | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Ente Certificatore | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| Sterile | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| Latex Free | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Garanzia | 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura. | |
| Fabbricante | INTERMED S.r.l. | |
| Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP | n/a | |
| Distributore | INTERMED S.r.l. | |

Caratteristiche tecniche

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| Materiali | Testina Archetto auricolare Lira Membrana | Zinco cromato Zinco cromato PVC PVC |
| Diametro membrana | 45 mm | |
| Diametro campana | 31,05 mm | |
| Altezza | 31,5 mm | |
| Lunghezza lira senza archetto | 55 cm | |
| Condizioni di utilizzo | Temperatura da +10°C a +40°C Umidità relativa da 30% a 85% | |
| Condizioni di stoccaggio | Temperatura da -20°C a +60°C Umidità relativa da 10% a 95% | |

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Informazioni utili*

| | |
|--------------------------------|---|
| CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE | Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. |
| CONSERVAZIONE | Conservare l'unità in un ambiente asciutto e fresco. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari e alla polvere. Arrotolare la lira con cautela evitando di formare angoli. |
| MANUTENZIONE E PULIZIA | Far eseguire i lavori di manutenzione e di riparazione solo da personale specializzato. Per la pulizia utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo né schiumoso. L'utilizzo di detersivi e disinfettanti non adatti può provocare danni alle superfici delicate dell'apparecchio. |
| MODALITÀ DI SMALTIMENTO | Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata. |

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

| COMPONENTE | DESCRIZIONE | PZ/CONFEZIONE |
|---------------|--|---------------|
| LF-302-X | Stetofonendoscopio per adulti LF-302. Codice prodotto variante secondo il colore scelto. | 1 |
| Manuale d'uso | Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo | 1 |

Accessori opzionali

| COMPONENTE | DESCRIZIONE | PZ/CONFEZIONE |
|------------|---------------------------------------|---------------|
| LF-057 | Olive auricolari morbide | 1 pa |
| LF-059 | Membrana per fonendoscopio per adulti | 1 |

Cronologia delle revisioni

| REV. | DATA | MODIFICA |
|------|------------|---|
| 2.0 | 19.03.2020 | Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito. |



Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

INTERMED S.r.l. via Ludovico d'Aragona, 11 • 20132 - Milano (MI) • Cod. Fisc./P. IVA 11703230158
Telefono +39 02.98248016 • Fax +39 02.98247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Capitale Sociale 51.640 € i.v. • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A Mi 1494142

Organizzazione con sistema di gestione
qualità aziendale certificato:
UNI CEI EN ISO 13485:2016