

MATERASSO IN ESPANSO E VISCOELASTICO – VITA FORM

Ref. MA-140

Ref. MA-140/1XX



Descrizione

Materasso in mousse viscoelastica a memoria di forma con supporto in espanso ad alta resilienza, dotato di fodera integrale elasticizzata, traspirante e idrorepellente.

Il design e la combinazione di materiali rendono il materasso indicato per la prevenzione delle piaghe da decubito su pazienti allettati per lunghi periodi.

Le caratteristiche principali del materasso:

- Confort per una prevenzione ottimale.
- Adattabilità a tutte le morfologie.
- Distribuzione omogenea delle pressioni di contatto sul corpo grazie all'aumento delle superfici di contatto.
- Riduzione delle forze di attrito sulla pelle.
- Miglior circolazione dell'aria che riduce gli effetti della macerazione della pelle.
- Ottima adattabilità alle movimentazioni di un letto articolato.

Materasso disponibile in varie varianti di misura.

Destinazione d'uso

Materasso indicato per la prevenzione delle piaghe da decubito per pazienti allettati.

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y033306	
Identificativo di Registrazione BD/RDM		
Materasso MA-140	1519372/R	
Materasso MA-140/100	1562151/R	
Materasso MA-140/110	1562153/R	
Materasso MA-140/120	1562155/R	
Materasso MA-140/140	1562158/R	
Materasso MA-140/160	1562159/R	
Codice Classificazione ISO	03.33.06.006	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio		
MA-140	2011	
MA-140/1XX	2013	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	Pharma Ouest Industries	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Caratteristiche Tecniche – Materasso

Materiale	Parte superiore in foam viscoelastico, densità 80 kg/m ³ Parte inferiore in foam ad alta resilienza, densità 37 kg/m ³
Dimensioni	
MA-140	194 x 86 x 17,5 cm
MA-140/100	194 x 100 x 17,5 cm
MA-140/110	194 x 110 x 17,5 cm
MA-140/120	194 x 120 x 17,5 cm
MA-140/140	194 x 140 x 17,5 cm
MA-140/160	194 x 160 x 17,5 cm
Portata massima	140 kg
Conformità resistenza al fuoco	EN 597-1 ; EN 597-2

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Caratteristiche Tecniche – Fodera

Materiale	Parte superiore e laterale in tessuto Pharmatex: Poliestere (25%) – Poliuretano (75 %). Base antiscivolo in Polipropilene (100 %)
Conformità resistenza al fuoco	EN 597-1 ; EN 597-2

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione delle piaghe da decubito, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che ne favoriscono l'insorgenza.
CONSERVAZIONE	Conservare in luogo asciutto e pulito. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
PULIZIA E DISINFEZIONE	Materasso: lavabile con panno morbido umidificato. Disinfezione con vapori di formaldeide a 45 °C per 3 ore. Fodera: lavabile fino alla temperatura di 60 °C. Non candeggiare. Non stirare. Lavabile a secco.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

* Per ulteriori dettagli sulle indicazioni descritte attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
MA-140 oppure MA-140/1XX**	Materasso in espanso viscoelastico Vita Form con fodera di rivestimento	1

**varianti di misura del materasso

Componenti opzionali

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
MA-140F	Fodera per materasso MA-140	1
MA-140100F	Fodera per materasso MA-140/100	1
MA-140110F	Fodera per materasso MA-140/110	1
MA-140120F	Fodera per materasso MA-140/120	1
MA-140140F	Fodera per materasso MA-140/140	1
MA-140160F	Fodera per materasso MA-140/160	1

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2016	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
2.0	03/11/2016	Modifica al layout delle tabelle di identificazione e caratteristiche tecniche di prodotto; aggiunta simbolo CE.
2.1	24/05/2017	Aggiunta dei codici varianti.

