

Misura	Codice	Descrizione
S (36-39)	WKPro Air-S	Walker tutore tibio tarsico fisso a stivale con cuscino ad aria misura small
M (40-43)	WKPro Air-M	Walker tutore tibio tarsico fisso a stivale con cuscino ad aria misura medium
L (44-46)	WKPro Air-L	Walker tutore tibio tarsico fisso a stivale con cuscino ad aria misura large

**Indicazioni**

- Distorsioni gravi.
- Fratture stabili del piede e della caviglia.
- Stabilizzazione della caviglia in fase pre o post operatoria.
- Per il solo modello alto, fratture stabili di tibia e perone.

Descrizione

- Struttura in nylon a stivale con suola antiscivolo.
- Rivestimento plantare in materiale plastico morbido.
- Tubolare imbottito completamente asportabile con chiusure a velcro e cuscino ad aria dotato di pompa di gonfiaggio e valvola di regolazione/scarico.
- Guscio di protezione anteriore fissabile a velcro sul tubolare dotato di doppia imbottitura.
- Protezione distale regolabile in tre posizioni.
- Tre cinghie di stabilizzazione con sistema di chiusura a velcro che consentono il corretto posizionamento ed il fissaggio del tubolare e del guscio di protezione anteriore.

Controindicazioni ed avvertenze

- Le indicazioni terapeutiche riportate non costituiscono, ovviamente, elenco esaustivo. Per ulteriori e più specifiche indicazioni fare sempre riferimento a valutazione del medico specialista.

- Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. In caso di reazioni allergiche, rivolgersi immediatamente al proprio medico curante.
- Il dispositivo medico deve essere impiegato a seguito di valutazione clinica effettuata da un medico specialista il quale, dopo la diagnosi, individuerà gli adattamenti necessari nel rispetto delle caratteristiche morfologiche dell'arto del paziente. Tali adattamenti e la successiva applicazione della tutore devono avvenire a cura di personale tecnico specializzato.
- Si raccomanda di verificare con regolarità l'integrità della struttura del tutore, la tenuta dei sistemi di chiusura ed il corretto funzionamento del sistema di gonfiaggio. Su indicazione ed a parere del medico specialista, effettuare controlli periodici per la verifica dell'efficacia funzionale della tutore.
- Si sconsiglia, per motivi di igiene ed efficacia terapeutica, il riutilizzo del tutore su altri pazienti.

Materiali componenti

Struttura e protezioni	Polipropilene
Suola	EVA
Rivestimento plantare	Polipropilene
Tubolare	Poliestere
Imbottitura tubolare	Poliuretano
Cinghie e chiusure	Nylon
Fibbie	Metallo
Imbottiture anteriori	Esterno poliestere ed interno poliuretano
Sistema di gonfiaggio	TPU, nylon e gomma

Modalità di lavaggioLavaggio parti in tessuto

Assicurarsi, preliminarmente, che la valvola di regolazione/scarico del sistema di gonfiaggio sia completamente chiusa. Rimuovere, quindi, il tubolare e le cinghie di stabilizzazione e procedere al lavaggio secondo le seguenti indicazioni:

Lavaggio parti rigide

Pulire con spugna morbida e detersivi neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive. Asciugare con panno.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Confezione 1 pezzo

Garanzia Il dispositivo è coperto da garanzia di due anni per difetti di fabbricazione. La garanzia non comprende eventuali anomalie derivanti da utilizzo non idoneo. La garanzia non si applica in caso di riparazioni non autorizzate dal fabbricante ovvero nel caso di parti o componenti soggetti ad usura.

Produttore INTERMED srl

Codice CND Y061206
N. Repertorio WKPro Air-S 988167/R
WKPro Air-M 988186/R
WKPro Air-L 988187/R

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE