

CINTURA ADDOMINALE CON BRETELLE E CERNIERA

Ref. 19/15



L'immagine del dispositivo è puramente indicativa.

Descrizione

Supporto realizzato in vellutino accoppiato con parte interna in retina traspirante, imbottitura in poliuretano espanso e tiranti di regolazione in nastro di poliestere, dotati di anelli.

Sistema di chiusura/apertura mediante clip rapide e sicure che permettono un fissaggio semplice e veloce e una rimozione immediata in caso di emergenza.

La cintura è facile da indossare ed è possibile regolarla in lunghezza. Le chiusure poste sui lati anteriori del busto consentono un rapido e corretto posizionamento per qualsiasi corporatura su tutti i modelli di carrozzina, sedia o comoda.

Destinazione d'uso

Cintura indicata per assicurare la corretta posizione di sicurezza del paziente su carrozzine, sedie o comode.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	☒ SI	☐ NO
Codice CND	Y122499	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	1293311	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	☒ SI	☐ NO
Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE	☒ I ☐ Im ☐ Is ☐ IIa ☐ IIb ☐ III	
Marcatura CE	☒ SI	☐ NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbrikante	☒ SI	☐ NO
Ente Certificatore	☐ SI	☒ NO
Sterile	☐ SI	☒ n/a
Latex Free	☒ SI	☐ NO
Anno immissione in commercio (Intermed)	2015	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbrikante	Erregi S.A.S. di Antonioli Roberto & C.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l. – Milano	

Caratteristiche Tecniche

Materiali	Cintura addominale Corpo Imbottitura Tiranti Fibbie di chiusura	Polipropilene 100% Poliammide Poliuretano espanso Poliestere Nylon
Misure (fig. 1)	A: 540 mm B: 500 mm C: 320 mm	
Dimensioni nastro	Lunghezza 1150 mm Altezza 25 mm	
Dimensioni nastro bretelle	Lunghezza 850 mm Altezza 25 mm	
Sistema di apertura/chiusura (fig. 2)	Fibbia a clip	

Immagini prodotto

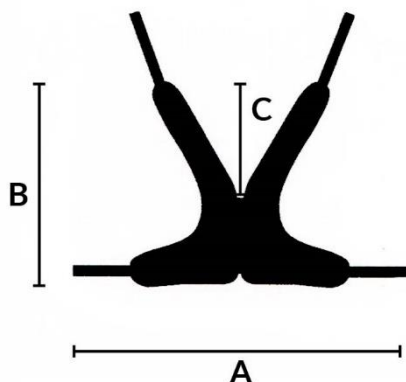


Fig. 1



Fig. 2

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Il dispositivo deve essere applicato con una tensione adeguata per consentire il corretto funzionamento, ma non deve essere serrato eccessivamente. Consentire l'inserimento di una mano tra il paziente e il dispositivo. Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione delle cadute e degli scivolamenti, e per mantenimento della postura del paziente, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che potrebbero influenzare questi eventi. Si raccomanda pertanto di monitorare con regolarità il paziente e la zona interessata dal dispositivo.
CONSERVAZIONE	Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Lavabile in lavatrice alla temperatura massima di 40° con detergenti neutri. Non stirare. Non candeggiare. Centrifuga ridotta. Possibilità di lavaggio a secco.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
19/15	Cintura addominale a bretelle con cerniera.	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo.	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2016	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
2.0	03/11/2016	Modifica al layout delle tabelle di identificazione e caratteristiche tecniche di prodotto; aggiunta simbolo CE.

