

CINTURA PELVICA

Ref. 21/15



L'immagine del dispositivo è puramente indicativa.

Descrizione

Supporto realizzato in vellutino accoppiato con parte interna in retina traspirante, imbottitura in poliuretano espanso e tiranti di regolazione in nastro di poliestere, dotati di anelli.

Sistema di chiusura/apertura mediante clip rapide e sicure che permettono un fissaggio semplice e veloce e una rimozione immediata in caso di emergenza.

La cintura è facile da indossare ed è possibile regolarla in lunghezza. Le chiusure poste sui lati anteriori del busto consentono un rapido e corretto posizionamento per qualsiasi corporatura su tutti i modelli di carrozzina, sedia o comoda.

Destinazione d'uso

Cintura indicata per assicurare la corretta posizione di sicurezza del paziente su carrozzine, sedie o comode.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y122499	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	1293316	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marchatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio (Intermed)	2015	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	Erregi S.A.S. di Antonioli Roberto & C.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l. – Milano	

Caratteristiche Tecniche

Materiali	Cintura addominale Corpo Imbottitura Tiranti Fibbie di chiusura	Polipropilene 100% Poliammide Poliuretano espanso Poliestere Nylon
Misure (fig. 1)	A: 480 mm B: 500 mm	
Dimensioni nastro addominale	Lunghezza 1150 mm Altezza 25 mm	
Dimensioni nastro seduta	Lunghezza 1450 mm Altezza 40 mm	
Sistema di apertura/chiusura (fig. 2)	Fibbia a clip	

Immagini prodotto

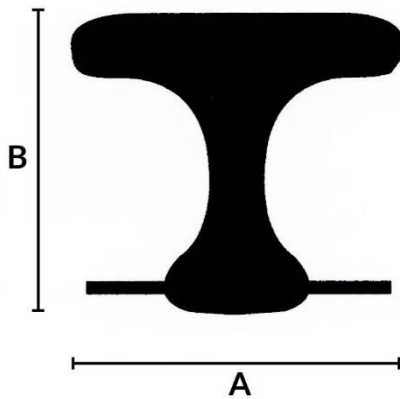


Fig. 1

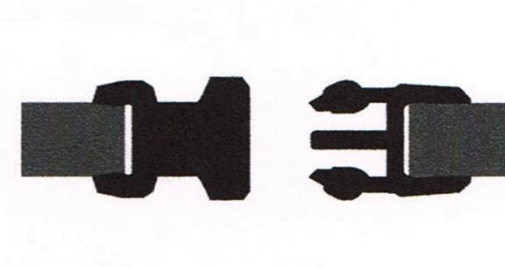


Fig. 2

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	<p>Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.</p> <p>Il dispositivo deve essere applicato con una tensione adeguata per consentire il corretto funzionamento, ma non deve essere serrato eccessivamente. Consentire l'inserimento di una mano tra il paziente e il dispositivo.</p> <p>Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione delle cadute e degli scivolamenti, e per mantenimento della postura del paziente, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che potrebbero influenzare questi eventi.</p> <p>Si raccomanda pertanto di monitorare con regolarità il paziente e la zona interessata dal dispositivo.</p>
CONSERVAZIONE	<p>Conservare in luogo fresco e asciutto.</p> <p>Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.</p>
MANUTENZIONE E PULIZIA	<p>Lavabile in lavatrice alla temperatura massima di 40° con detersivi neutri.</p> <p>Non stirare. Non candeggiare. Centrifuga ridotta.</p> <p>Possibilità di lavaggio a secco.</p>
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	<p>Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.</p>

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
21/15	Cinatura pelvica	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo.	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2016	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
2.0	03/11/2016	Modifica al layout delle tabelle di identificazione e caratteristiche tecniche di prodotto; aggiunta simbolo CE.

