

## CUSCINI AD ARIA STROBO – 2 VALVOLE

*Ref. CA-xxxx-2x*



### Descrizione

Il cuscino è composto da una struttura a bolle d'aria connesse che permette una distribuzione ottimale delle pressioni di appoggio, garantendo la stabilità necessaria e il massimo confort. Il cuscino, realizzato in PVC e gomma, è dotato di due valvole per il gonfiaggio che permettono di regolare la quantità d'aria diversamente in due settori separati. Il cuscino è inoltre disponibile in tre diverse altezze.

La fodera è di tipo traspirante con base antiscivolo e fissaggi a velcro.

La confezione include, quale dotazione standard, una fodera di ricambio, la pompa di gonfiaggio ed un kit di riparazione.

### Destinazione d'uso

È un ausilio indicato nella prevenzione del decubito per utenti che stanno in posizione seduta, per lunghi periodi nell'arco della giornata.

## Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y033303	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	Ref. CA-4040-26 740571/R Ref. CA-4540-26 740572/R Ref. CA-4545-26 740573/R Ref. CA-5045-26 740587/R Ref. CA-4040-28 1709207/R Ref. CA-4540-28 1709208/R Ref. CA-4545-28 1709209/R Ref. CA-5040-28 1709210/R Ref. CA-5045-28 1709211/R Ref. CA-4040-210 740589/R Ref. CA-4540-210 740607/R Ref. CA-4545-210 740608/R Ref. CA-5045-210 740648/R	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2013	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

## Caratteristiche Tecniche

Dimensioni	Ref. CA-4040-26	40 x 40 x 6 cm
	Ref. CA-4540-26	45 x 40 x 6 cm
	Ref. CA-4545-26	45 x 45 x 6 cm
	Ref. CA-5045-26	50 x 45 x 6 cm
	Ref. CA-4040-28	40 x 40 x 8 cm
	Ref. CA-4540-28	45 x 40 x 8 cm
	Ref. CA-4545-28	45 x 45 x 8 cm
	Ref. CA-5040-28	50 x 40 x 8 cm
	Ref. CA-5045-28	50 x 45 x 8 cm
	Ref. CA-4040-210	40 x 40 x 10 cm
	Ref. CA-4540-210	45 x 40 x 10 cm
	Ref. CA-4545-210	45 x 45 x 10 cm
	Ref. CA-5045-210	50 x 45 x 10 cm
Materiale Cuscino	PVC e gomma	
Materiale Fodera	Parte superiore: PVC (70 %) e Dacron (30%) Base antiscivolo in Dacron	
Peso	Circa 2 kg (in funzione della misura)	
Densità	n/a	
Portata massima	150 kg	

## Informazioni utili\*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Per un corretto impiego è necessario attenersi alle semplici operazioni riportate nel libretto delle istruzioni contenuto in ogni confezione. Sebbene il cuscino sia indicato per la prevenzione del decubito, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che ne favoriscono l'insorgenza.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Cuscino: pulire con panno morbido e detersivi neutri. Risciacquare sotto acqua corrente. Non immergere. Non lavare in lavatrice. Asciugare all'aria aperta. Fodera: lavare con ciclo normale ad una temperatura massima di 30 °C. Non stirare. Non lavare a secco. Non candeggiare. Non asciugare nell'asciugatrice.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

\*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

## Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
CA-xxxx-2x**	Cuscino a bolle d'aria a 2 valvole	1
Fodera	Fodera per il cuscino	2
CA-P	Dispositivo per il gonfiaggio del cuscino	1
Kit di riparazione	Kit per eventuale riparazione	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo.	1

\*\*Codice prodotto a seconda della misura richiesta.

## Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2016	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
1.1	05/06/2018	Modifica al layout delle tabelle di identificazione e caratteristiche tecniche di prodotto; aggiunta del simbolo CE; aggiornamento sistema gestione qualità nel footer; aggiunta di nuove misure del prodotto.

