

**COLLARE CERVICALE  
MORBIDO**

Codice	Descrizione
<b>CC-002S</b>	Collare cervicale morbido - altezza 7,5 cm - misura small
<b>CC-002M</b>	Collare cervicale morbido - altezza 7,5 cm - misura medium
<b>CC-002L</b>	Collare cervicale morbido - altezza 7,5 cm - misura large
<b>CC-003S</b>	Collare cervicale morbido - altezza 10 cm - misura small
<b>CC-003M</b>	Collare cervicale morbido - altezza 10 cm - misura medium
<b>CC-003L</b>	Collare cervicale morbido - altezza 10 cm - misura large

**Indicazioni**

- Distorsioni benigne.
- Torcicollo.
- Artrosi cervicale.

**Descrizione**

- Imbottitura in mousse di poliuretano anatomica preformata.
- Rivestimento in cotone ipoallergenico.
- Cinturino di chiusura posteriore a velcro.

**Controindicazioni ed avvertenze**

- Le indicazioni terapeutiche riportate non costituiscono, ovviamente, elenco esaustivo. Per ulteriori e più specifiche indicazioni fare sempre riferimento a valutazione del medico specialista.
- Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. In caso di reazioni allergiche, rivolgersi immediatamente al proprio medico curante.
- Il dispositivo medico deve essere impiegato a seguito di valutazione clinica effettuata da un medico specialista il quale, dopo la diagnosi, individuerà la misura e gli eventuali adattamenti nel rispetto delle caratteristiche morfologiche del paziente. Tali adattamenti e la successiva applicazione del collare devono avvenire a cura di personale tecnico specializzato.

- Si raccomanda di verificare con regolarità l'integrità del collare e la tenuta dei sistemi di chiusura. Su indicazione ed a parere del medico specialista, effettuare controlli periodici per la verifica dell'efficacia funzionale del collare.
- Si sconsiglia, per motivi di igiene ed efficacia terapeutica, il riutilizzo del collare su altri pazienti.

#### **Materiali componenti**

Rivestimento	Cotone
Imbottitura	Poliuretano espanso
Cinturino di chiusura	Nylon

#### **Dati tecnici**

<b>Modello</b>	<b>Circonferenza collo</b>
<b>CC-002S</b>	da 26 a 36 cm
<b>CC-002M</b>	da 37 a 43 cm
<b>CC-002L</b>	da 44 a 52 cm
<b>CC-003S</b>	da 26 a 36 cm
<b>CC-003M</b>	da 37 a 43 cm
<b>CC-003L</b>	da 44 a 52 cm

#### **Modalità di lavaggio**



#### **Conservazione**

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

#### **Smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

**Confezione** 1 pezzo

**Garanzia** Il dispositivo è coperto da garanzia di due anni per difetti di fabbricazione. La garanzia non comprende eventuali anomalie derivanti da utilizzo non idoneo. La garanzia non si applica in caso di riparazioni non autorizzate dal fabbricante ovvero nel caso di parti o componenti soggetti ad usura.

**Produttore** **INTERMED srl**

**Codice CND** **Y060312**  
**N. Repertorio** **CC-002S 1051337/R**  
**CC-002M 1051406/R**  
**CC-002L 1051407/R**  
**CC-003S 1051408/R**  
**CC-003M 1051409/R**  
**CC-003L 1051410/R**

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE