

Rev. 04
Giugno 2009



Scheda tecnica

CN-100.650

Borsa acqua calda rivestita in
tessuto



Codice	Descrizione
CN-100.650	Borsa acqua calda in gomma naturale rivestita in tessuto

Indicazioni	
Produttore	FOR.ME.SA Srl
CND	V0401
Repertorio	186648/R
Conformità	Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE

Indicazioni

Terapia del caldo. Disturbi alla circolazione sanguigna, ipertono muscolare, sciatica, lombosciatalgia, mal di schiena, dolori mestruali, malattie reumatiche.

Descrizione

Borsa per acqua calda bilamellata in gomma naturale con tappo di chiusura ermetica a vite provvista di una fodera in tessuto morbido.

Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Riempire esclusivamente con acqua ad una temperatura tra +15°C e +50°.

Non utilizzare su cute lesa.

Contattare sempre il medico curante prima dell'uso.

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Pulizia

Prima di utilizzare il dispositivo la prima volta risciacquare l'interno della borsa con acqua tiepida. La superficie esterna può essere pulita quando necessario con acqua tiepida e detergente neutro non aggressivo.

Dopo ogni uso svuotare il contenuto e lasciare asciugare completamente il dispositivo prima di avvitare il tappo e riporlo.

In caso di inutilizzo prolungato prima di riavvitare il tappo lasciare all'interno un certo quantitativo di aria per evitare l'adesione delle pareti della borsa.

Non mettere a contatto con oggetti taglienti, appuntiti o abrasivi.

Lavare il rivestimento a max. 30° - Non stirare

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.



INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142