

E-Light+ – Carrozzina Standard in alluminio ad autospinta

Ref. E-LIGHT+ P



Descrizione

Carrozzina con telaio pieghevole in alluminio e doppia crociera, ruote posteriori da 24" con copertoni pieni in PU ad estrazione rapida e possibilità di posizionamento variabile, con corrimano in alluminio. Freni di stazionamento, ruote per passaggi stretti (sistema antiribaltamento disponibile su richiesta) e possibilità di regolazione in profondità del sedile. Le ruote anteriori hanno una dimensione di 7.5 "montate su una forcella in alluminio con la possibilità di variare la posizione o il diametro delle ruote, per variare l'altezza del sedile da terra. Lo schienale con tasca posteriore e il sedile sono imbottiti e realizzati in Nylon. (disponibile a richiesta in versione ignifuga). I braccioli sono ribaltabili con imbottitura in Poliuretano, pannello laterale per protezione indumenti e regolabili in altezza. Le pedane amovibili sono dotate di cinturino ferma tallone, hanno la possibilità di rotazione posteriore e regolazione in altezza della pedana. La carrozzina è disponibile in diverse misure di seduta come indicato nella tabella delle caratteristiche tecniche. Colore Blu metallizzato.

Destinazione d'uso

Carrozze indicate per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, presentano riduzione delle capacità motorie.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	☒ SI	☐ NO
Codice CND	Y122106	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	E-LIGHT+P	3033329/R

M4.2-03 Rev.5 03/06/2021

Identificativo di registrazione EUDAMED	Non ancora rilasciato	
Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561	☒ SI	☐ NO
Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745	☒ I ☐ Im ☐ Is ☐ IIa ☐ IIb ☐ III	
Marcatura CE	☒ SI	☐ NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbrikante	☒ SI	☐ NO
Ente Certificatore	☐ SI	☒ NO
Sterile	☐ SI	☒ NO
Latex Free	☒ SI	☐ NO
Anno immissione in commercio	2026	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbrikante	INTERMED S.r.l.	
SRN Fabbrikante	IT-MF-000013039	

IDENTIFICAZIONE UDI

BASIC UDI-DI	805699223CARROZZINE25
Codice Ref.	UDI-DI
E-LIGHT+-37P	8056992234406
E-LIGHT+-40P	8056992234420
E-LIGHT+-42P	8056992234444
E-LIGHT+-44P	8056992234475
E-LIGHT+-46P	8056992234482
E-LIGHT+-49P	8056992234505
E-LIGHT+-52P	8056992234529

Caratteristiche tecniche

E-LIGHT+	37P	40P	42P	44P	46P	49P	52P
Larghezza seduta	37 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	49 cm	52 cm
Larghezza totale	56 cm	59 cm	60 cm	62 cm	64 cm	66 cm	69 cm
Profondità seduta	42-46 cm						
Lunghezza totale	107-111 cm						
Altezza seduta	52 cm						
Altezza schienale	40 cm						
Altezza dal suolo maniglie di spinta	92 cm						
Altezza braccioli	23 – 30 cm						

M4.2-03 Rev.5 03/06/2021

Diametro route posteriori	24"
Diametro route anteriori	7,5"
Diametro ruotino per passaggi stretti	2,7"
Peso	≥ 15 kg, secondo configurazione
Portata massima	120 kg per misure da 37 a 44 cm 140 Kg per misure da 46 a 52 cm
Materiali	Telaio in Alluminio Schienale e seduta in Nylon Ruote posteriori in Poliuretano Forcella per route anteriori in Alluminio Imbottitura braccioli in Poliuretano Sistema frenante in Alluminio Mancorrenti in Alluminio
Freni di stazionamento	Leve ad azionamento manuale in alluminio
Braccioli	Desk

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Per mantenere l'efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente si rendono necessari alcuni controlli periodici sullo stato di tutti i componenti. Pulire con panno umido utilizzando detergenti non aggressivi, poi asciugare in modo accurato.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

***Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.**

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
**E-LIGHT+-xxP	Carrozzina standard leggera ad autospinta	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo.	1

****La confezione contiene un solo modello di carrozzina a seconda della misura scelta.**

Accessori opzionali

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
EL-A01	Pedane elevabili	2

EL-A02	Sistema antiribaltamento	2
*EL-A05-Sxx	Tela seduta autoestinguente	1
*EL-A06-Bxx	Tela schienale autoestinguente	1
P-36	Asta porta-flebo	1
EL-22	Prolunga schienale	1

***Indicare la misura della larghezza in fase di ordine.**

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	20/05/2026	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.

CE