

FASCIA FERMAPOLSO
Ref. ER-2708


L'immagine del dispositivo è puramente indicativa.

Descrizione

Dispositivo realizzato in vellutino accoppiato con parte interna in retina traspirante, imbottitura in poliuretano espanso e tiranti in nastro di poliestere con regolazione. Sistema di chiusura/apertura mediante clips rapide e sicure che permettono un fissaggio semplice e veloce e una rimozione immediata in caso di emergenza.

Destinazione d'uso

Fascia indicata per controllare i movimenti in pazienti su carrozzina.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y122406	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	3037772/R	
Identificativo di registrazione EUDAMED	Non ancora rilasciato	
Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO

M4-2-03 Rev.5 03/06/2021

Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2026	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
SRN Fabbricante	IT-MF-000013039	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

IDENTIFICAZIONE UDI

BASIC UDI-DI	805347077APSRGDD
Codice Ref.	UDI-DI
ER-2708	

Caratteristiche tecniche

Materiali	Tessuto	Vellutino accoppiato (Pam)
	Tiranti	Poliestere
	Imbottitura	Mpt-moltoprene (poliuretano espanso a base pes)
	Parte Interna	Retina traspirante (Pes)
		(29% Pam / 39% Mtp - Pes / 32% Pes)

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Il dispositivo deve essere applicato con una tensione adeguata a consentire il corretto funzionamento ma non deve essere serrato eccessivamente. Consentire l'inserimento di una mano tra il paziente e il dispositivo. Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione delle cadute e degli scivolamenti e per il mantenimento della postura del paziente, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che potrebbero influenzare questi eventi. Si raccomanda pertanto di monitorare con regolarità il paziente e la zona interessata dal dispositivo.
CONSERVAZIONE	Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Lavabile in lavatrice alla temperatura massima di 40° con detersivi neutri. Non stirare. Non candeggiare. Centrifuga ridotta. Possibilità di lavaggio a secco.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
ER-2708	Fascia fermapolso	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo.	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
0.0	20/05/2026	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.

CE