

**CINTURA ADDOMINALE
ABDOFIX**

| Altezza 20 cm | |
|---------------|-----------|
| Misura | Codice |
| S | FA-001S |
| M | FA-001M |
| L | FA-001L |
| XL | FA-001XL |
| XXL | FA-001XXL |

| Altezza 24 cm | |
|---------------|-----------|
| Misura | Codice |
| S | FA-002S |
| M | FA-002M |
| L | FA-002L |
| XL | FA-002XL |
| XXL | FA-002XXL |

| Altezza 27 cm | |
|---------------|-----------|
| Misura | Codice |
| S | FA-003S |
| M | FA-003M |
| L | FA-003L |
| XL | FA-003XL |
| XXL | FA-003XXL |

**Indicazioni**

- Deficienza temporanea della parete addominale.
- Trattamenti in fase post-operatoria.
- Contenzioni addominali o toraciche temporanee o permanenti.

Descrizione

- Cintura contenitiva addominale o toracica realizzata in tessuto elastico traspirante.
- Sistema di chiusura a velcro.

Controindicazioni ed avvertenze

- Le indicazioni terapeutiche riportate non costituiscono, ovviamente, elenco esaustivo. Per ulteriori e più specifiche indicazioni fare sempre riferimento a valutazione del medico specialista.
- Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. In caso di reazioni allergiche, rivolgersi immediatamente al proprio medico curante.
- Il dispositivo medico deve essere impiegato a seguito di valutazione clinica effettuata da un medico specialista il quale, dopo la diagnosi, individuerà la misura e gli eventuali adattamenti nel rispetto delle caratteristiche morfologiche paziente. Tali adattamenti e la successiva applicazione della cintura addominale devono avvenire a cura di personale tecnico specializzato.
- Si raccomanda di verificare con regolarità l'integrità della cintura e la tenuta dei sistemi di chiusura. Su indicazione ed a parere del medico specialista, effettuare controlli periodici per la verifica dell'efficacia funzionale della cintura.
- Si sconsiglia, per motivi di igiene ed efficacia terapeutica, il riutilizzo della cintura su altri pazienti.



SCHEDA TECNICA

CINTURA ADDOMINALE ABDOFIX

Rev 00

Luglio 2013

Materiali componenti

Poliestere 50%, Poliammide 33%, Elastan 17%.

Dati tecnici

| Modello | | | Circonferenza vita |
|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| FA-001S | FA-002S | FA-003S | da 65 a 80 cm |
| FA-001M | FA-002M | FA-003M | da 75 a 90 cm |
| FA-001L | FA-002L | FA-003L | da 85 a 100 cm |
| FA-001XL | FA-002XL | FA-003XL | da 95 a 110 cm |
| FA-001XXL | FA-002XXL | FA-003XXL | da 105 a 140 cm |

Modalità di lavaggio



Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Confezione

1 pezzo

Garanzia

Il dispositivo è coperto da garanzia di due anni per difetti di fabbricazione. La garanzia non comprende eventuali anomalie derivanti da utilizzo non idoneo. La garanzia non si applica in caso di riparazioni non autorizzate dal fabbricante ovvero nel caso di parti o componenti soggetti ad usura.

Produttore

INTERMED srl

Codice CND

Y060308

N. Repertorio

| | |
|-----------|-----------|
| FA-001S | 1051950/R |
| FA-001M | 1051986/R |
| FA-001L | 1051987/R |
| FA-001XL | 1051988/R |
| FA-001XXL | 1051989/R |
| FA-002S | 1051990/R |
| FA-002M | 1051991/R |
| FA-002L | 1051992/R |
| FA-002XL | 1051993/R |
| FA-002XXL | 1051994/R |
| FA-003S | 1051995/R |
| FA-003M | 1051996/R |
| FA-003L | 1051997/R |
| FA-003XL | 1051998/R |
| FA-003XXL | 1051999/R |

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE