

**GINOCCHIERA APERTA
CON STECCHES ARTICOLATE**

Misura	Codice
S	GN-001S
M	GN-001M
L	GN-001L
XL	GN-001XL



Indicazioni

- Traumi distorsivi.
- Lassità legamentosa cronica.
- Gonartrosi.

Descrizione

- Ginocchiera aperta realizzata in neoprene con foro rotuleo e doppia chiusura anteriore a velcro.
- Doppia cinghia di stabilizzazione in nylon con sistema di chiusura a velcro.
- Stecche articolate laterali estraibili per coadiuvare il movimento dell'articolazione.

Materiali componenti

Tessuto	Neoprene
Cinghie e chiusure	Nylon
Stecche	Alluminio
Alloggiamenti stecche	Poliestere
Fibbie	Poliossimetilene

Il neoprene contiene lattice.

GINOCCHIERA APERTA CON STECCHE ARTICOLATE

Dati tecnici

Modello	Circonferenza min-max		Lunghezza
	Coscia	Polpaccio	
GN-001S	390-470 mm	290-370 mm	310 mm
GN-001M	470-530 mm	370-430 mm	310 mm
GN-001L	530-600 mm	430-500 mm	310 mm
GN-001XL	600-670 mm	500-570 mm	310 mm

Controindicazioni ed avvertenze

- Le indicazioni terapeutiche riportate non costituiscono, ovviamente, elenco esaustivo. Per ulteriori e più specifiche indicazioni fare sempre riferimento a valutazione del medico specialista.
- Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. In caso di reazioni allergiche, rivolgersi immediatamente al proprio medico curante.
- Il dispositivo medico deve essere impiegato a seguito di valutazione clinica effettuata da un medico specialista il quale, dopo la diagnosi, individuerà la misura e gli eventuali adattamenti nel rispetto delle caratteristiche morfologiche dell'arto del paziente. Tali adattamenti e la successiva applicazione della ginocchiera devono avvenire a cura di personale tecnico specializzato.
- Si raccomanda di verificare con regolarità l'integrità della ginocchiera, la tenuta dei sistemi di chiusura ed il corretto funzionamento delle stecche articolate. Su indicazione ed a parere del medico specialista, effettuare controlli periodici per la verifica dell'efficacia funzionale della ginocchiera.
- Si sconsiglia, per motivi di igiene ed efficacia terapeutica, il riutilizzo del tutore su altri pazienti.

Modalità di lavaggio

Rimuovere le due stecche in alluminio e procedere al lavaggio secondo le seguenti indicazioni:



Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Confezione

1 pezzo

Garanzia

Il dispositivo è coperto da garanzia di due anni per difetti di fabbricazione. La garanzia non comprende eventuali anomalie derivanti da utilizzo non idoneo. La garanzia non si applica in caso di riparazioni non autorizzate dal fabbricante ovvero nel caso di parti o componenti soggetti ad usura.

Produttore

INTERMED srl

Codice CND

Y061209

N. Repertorio

GN-001S 969294/R
GN-001M 969314/R
GN-001L 969315/R
GN-001XL 969316/R

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE