

**GINOCCHIERA
IMMOBILIZZATORE**

Misura	Codice	Lunghezza
S	GN-005S	31 cm
M	GN-005M	41 cm
L	GN-005L	51 cm
XL	GN-005XL	61 cm
XXL	GN-005XXL	69 cm

**Indicazioni**

- Immobilizzazione del ginocchio in posizione estesa in caso di lesioni o fratture.
- Immobilizzazione del ginocchio prima e dopo interventi chirurgici.
- Trattamento di contusioni, slogature e distorsioni del ginocchio.

Descrizione

- Struttura composta da tre pannelli rimovibili uniti con sistema velcro facilmente adattabili alla morfologia dell'arto del paziente.
- Pannello centrale dotato di doppia stecca in alluminio per immobilizzazione posteriore con possibilità di estrazione.
- Pannelli laterali dotati di stecca singola in alluminio per immobilizzazione laterale con possibilità di estrazione.
- Quattro cinghie di stabilizzazione con chiusura a velcro posizionate, a coppie, su ciascuna fascia laterale.

Controindicazioni ed avvertenze

- Le indicazioni terapeutiche riportate non costituiscono, ovviamente, elenco esaustivo. Per ulteriori e più specifiche indicazioni fare sempre riferimento a valutazione del medico specialista.
- Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. In caso di reazioni allergiche, rivolgersi immediatamente al proprio medico curante.
- Il dispositivo medico deve essere impiegato a seguito di valutazione clinica effettuata da un medico specialista il quale, dopo la diagnosi, individuerà la misura e gli eventuali adattamenti nel rispetto delle caratteristiche morfologiche dell'arto del paziente. Tali adattamenti e la successiva applicazione della ginocchiera devono avvenire a cura di personale tecnico specializzato.
- Si raccomanda di verificare con regolarità l'integrità della ginocchiera e la tenuta dei sistemi di chiusura. Su indicazione ed a parere del medico specialista, effettuare controlli periodici per la verifica dell'efficacia funzionale della ginocchiera.
- Si sconsiglia, per motivi di igiene ed efficacia terapeutica, il riutilizzo della ginocchiera su altri pazienti.

**GINOCCHIERA
IMMOBILIZZATORE****Materiali componenti**

Imbottitura	Poliuretano
Tessuto interno	Cotone 80%, Poliammide 20%
Tessuto esterno	Poliammide
Cinghie	Polipropilene
Fibbie	Poliossimetilene
Stecche	Alluminio

Modalità di lavaggio

Rimuovere le stecche in alluminio presenti all'interno delle tre fasce e procedere al lavaggio secondo le seguenti indicazioni:

**Conservazione**

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Confezione 1 pezzo

Garanzia Il dispositivo è coperto da garanzia di due anni per difetti di fabbricazione. La garanzia non comprende eventuali anomalie derivanti da utilizzo non idoneo. La garanzia non si applica in caso di riparazioni non autorizzate dal fabbricante ovvero nel caso di parti o componenti soggetti ad usura.

Produttore **INTERMED srl**

Codice CND **Y061209**

<u>N. Repertorio</u>	GN-005S	1052001/R
	GN-005M	1052046/R
	GN-005L	1052047/R
	GN-005XL	1052048/R
	GN-005XXL	1052049/R

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE