

## IG-MASK SEMIMASCHERA FFP2 NR



### Varianti disponibili

Sono disponibili 3 varianti taglia e diverse varianti colore secondo la tabella di seguito riportata:

VARIANTI COLORE	Ref. TAGLIA S Ideale per bambini sino ai 7-9 anni (fino a 11 anni se con viso minuto)	Ref. TAGLIA M ideale per ragazzi o ragazze e/o persone adulte con viso minuto	Ref. TAGLIA L Taglia standard per adulti
BIANCO	//	//	IGMASK
NERO	//	IGMASK.M-NERO	IGMASK-NERO
BLU JEANS	//	//	IGMASK-JEANS
BLU ROYAL	IGMASK.S-BLU	IGMASK.M-BLU	IGMASK-BLU
TURCHESE	IGMASK.S-TURC	IGMASK.M-TURC	//
FUCSIA	IGMASK.S-FUCS	IGMASK.M-FUCS	IGMASK-FUCSIA
VERDE PRATO	IGMASK.S-VPR	IGMASK.M-V.PR	//
VERDE JAGUAR	//	IGMASK.M-VERD	IGMASK-VERDE
ARANCIONE	IGMASK.S-ARAN	//	IGMASK-ARANC
ROSSO	//	//	IGMASK-ROSSO
GIALLO	IGMASK.S-GIAL	//	//

### Descrizione e Destinazione d'uso

Semimaschera filtrante FFP2 adatta all'utilizzo in caso di esposizione ad agenti sottoforma di particelle solide o liquide quali:

- ✓ Verniciature (base solventi)
- ✓ Rivestimento (base acqua applicazioni a pennello, rullo, spruzzo)
- ✓ Sabbature
- ✓ Sverniciature
- ✓ Smerigliature

- ✓ Taglio
  - ✓ Perforazione
  - ✓ Costruzioni (calcestruzzi)
  - ✓ Manutenzione (intonacatura, miscelazione cemento, demolizioni, escavazioni, movimento terra)
  - ✓ Lavorazione del metallo (fonderie): saldature, placcatura, elettrificazione, finitura, stozzatura, perforazione
  - ✓ Rivettatura, taglio ossiacetilenico manipolazione di metallo fuso: fusione.
  - ✓ Pulizia / gestione rifiuti: disinfezione pulizia, rimozione, rifiuti, manipolazione amianto, rimozione amianto.
  - ✓ Allergie / rischio biologico: polline, pelo animale, muffe, funghi, batteri, virus, tubercolosi, fumi di scarico, fumo, inquinamento atmosferico.
  - ✓ Agricoltura/silvicoltura: gestione abbattimento animali infetti, alimentazione bestiame, pulizia stalle, manipolazione paglia, compostaggio, raccolto pesticidi insetticidi (nebulizzazione)
  - ✓ Lavori in miniera/cava: lavori in galleria perforazioni, noiatura, escavazioni dragaggio pulizia taglio, perforazione minerali, sostituzione filtri
  - ✓ Altre applicazioni industriali: inchiostri, coloranti, solventi, sostanze chimiche, additivi, sostanze, sostanze chimiche in polvere, industria farmaceutica, lavorazione gomma plastica, estrazione lavorazione di olio e gas produzione di terracotta e ceramiche, macinatura legno e carta
- N.B. Non adatta in caso di presenza di aria con carenza di ossigeno.

Le mascherine sono aromatizzate alla menta piperita.

## Identificazione prodotto

Dispositivo di Protezione Individuale (DPI)	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Conformità al Regolamento UE 2016/425	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Tipo	Semimaschera	
Classe	FFP2	
Riusabile o singolo uso	NR (Non riutilizzabile)	
Classificazione	Categoria III	
Standard applicati	EN 149:2001 + A1:2009	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	Eurofins Product Testing Italy S.r.l., Via Cuornè, 21 – 10156 Torino – Italia (numero di notifica 0477)	
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2020	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione	
Fabbricante	EKIPLABS S.r.l. – Prevalle (BS) - Italy	
Distributore	INTERMED S.r.l. – Milano – Italy	

## Informazioni utili

<b>CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE</b>	<p>Se risulta impossibile ottenere un'adeguata adesione della mascherina al profilo del volto, non entrare in ambienti di rischio potenziale.</p> <p>La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in queste istruzioni può indurre ad un uso errato del DPI</p> <p>Una mascherina propriamente scelta è essenziale per proteggere la salute.</p> <p>Prima dell'utilizzo del DPI, consultare una persona addestrata o personale esperto in sicurezza del lavoro per determinare l'idoneità o meno all'utilizzo.</p> <p>Utilizzare solo in ambienti adeguatamente ventilati con sufficiente tenore di ossigeno.</p> <p>Non utilizzare quando le concentrazioni dei contaminanti sono immediatamente pericolose per la salute.</p> <p>Non utilizzare in atmosfera dove c'è pericolo d'esplosione</p> <p>Abbandonare immediatamente l'area di lavoro se: la respirazione diventa difficoltosa e/o si avvertono senso di angoscia o vertigini.</p> <p>Peli di barba, ed affezioni respiratore possono ridurre l'efficienza di queste mascherine filtranti.</p> <p>Non modificare od alterare in nessun modo la mascherina filtrante.</p> <p>Solo monouso, scartare la mascherina dopo il singolo utilizzo.</p>
<b>CONSERVAZIONE</b>	<p>Il prodotto deve essere conservato nella propria singola e sigillata confezione in plastica. Non subisce variazioni o degrading di prestazione entro il range di temperature -20°C ÷ +50°C e con umidità relativa massima &lt;99%</p>
<b>MANUTENZIONE E PULIZIA</b>	<p>Il prodotto non è lavabile e non è riutilizzabile. Deve pertanto essere utilizzato entro il periodo di validità indicato sulla confezione esterna</p>
<b>MODALITÀ DI SMALTIMENTO</b>	<p>Smaltire il prodotto seguendo le indicazioni vigenti presso il proprio comune/struttura in materia di smaltimento/smistamento rifiuti.</p>

## Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
IG-MASK**	Semimaschera FFP2 NR	20 pezzi
-	Ganci nucali	-
-	Strisce biadesive anallergiche (applicabili in posizione nasello)	-
	Istruzioni per il corretto utilizzo	

\*\* per i codici variante ordinabili far riferimento alla tabella riportata in prima pagina

## Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
0.0	30/10/2020	Prima emissione.
0.1	08/03/2021	Aggiunta varianti taglie e colore
1.0	14/01/2022	Aggiornamento ragione sociale del fabbricante e nuovo format scheda tecnica

