

TOURNIQUET PER EMOSTASI CON CHIUSURA IN ABS

Ref. LM-01



Descrizione

Tourniquet per emostasi in tessuto elasticizzato Blu con chiusura di sicurezza in ABS resistente.
Tourniquet utilizzabile con una sola mano. Nessun fastidio alla pelle durante l'applicazione.
Privo di componenti in metallo e in lattice. Fascia lavabile e sostituibile.

Destinazione d'uso

Tourniquet per emostasi utilizzato per il blocco momentaneo della circolazione sanguigna in un distretto corporeo in condizioni di emergenza oppure per favorire la visibilità dei vasi per il prelievo ematico o l'infusione di sostanze.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	V9003	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	2045724/R	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2020 (Intermed)	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura	
Fabbricante	ZHEJIANG HONSUN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD. (Cina)	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	Shanghai International Holding Corp. GmbH (Germania)	
Distributore	2020 (Intermed)	

Materiali

Fascia	Poliestere con lycra
Fibbia	ABS
Ftalati	Non presenti

Dimensioni

Tourniquet	Lunghezza x larghezza x spessore: 45 cm x 2,5 cm
Peso	30 g

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Applicare il tourniquet su cute integra. Non applicare il tourniquet su cute lesa o alterata.
CONSERVAZIONE	Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Lavare a mano con acqua e detergente non aggressivo né schiumoso a 40°C. Risciacquare almeno due volte con acqua tiepida. Se il tourniquet è contaminato con sangue, secrezioni o altri fluidi biologici, smaltire immediatamente il dispositivo.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di rifiuti sanitari.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni fornite dal fabbricante.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
LM-01	Tourniquet per emostasi con chiusura in ABS.	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	27/07/2020	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.

