

Rev. 02  
Febbraio 2011

 LifeMED

## Scheda tecnica

M-00.09.325

Sfigmomanometro da rail

 INTERMED  
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
M-00.09.325	Sfigmomanometro ad aneroide da rail a 2 tubi latex free GAMMA XXL LF-R

Indicazioni	
Produttore	HEINE Optotechnik, Herrsching (Germany)
CND	C9006
Repertorio	85576/R
Conformità	Dispositivo Medico di classe Im conforme alla Direttiva CEE 93/42

### Indicazioni

Gli sfigmomanometri ad aneroide HEINE GAMMA®, sono realizzati per la misura della pressione arteriosa da rilevare all'avambraccio o alla coscia utilizzando gli appositi bracciali.

### Descrizione

Sfigmomanometro ad aneroide da rail con sistema di misura a 2 tubi. Quadrante dal diametro di 130 mm, cifre nere su sfondo bianco per una chiara lettura dei valori, Esclusiva valvola rilascio aria di precisione che consente un controllo del rilascio d'aria fine ed esatto, rapido sgonfiaggio e lunga durata. Un fermo in gomma previene il blocco della valvola. Struttura resistente in policarbonato e cavo spiralato di 3 m. Bracciale calibrato di alta qualità, singolo tubo con chiusura a velcro lavabile.

### Accessori presenti all'interno della confezione

M-00.09.325
Bracciale adulti latex free e monopalla

**INTERMED s.r.l.**

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

## Caratteristiche tecniche

Parametri rilevati:	Pressione arteriosa
Metodi di misura:	Auscultatorio Riva Rocci Korotkoff
Range di pressione di gonfiaggio:	0-300 mmHg
Pressurizzazione:	Manuale mediante monopalla

## Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

## Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. Arrotolare il tubo prolunga del bracciale con cautela evitando di formare angoli.

## Manutenzione e pulizia

### Sfigmomanometro:

Tutte le superfici accessibili dello sfigmomanometro possono essere pulite / strofinate con un panno umido (acqua, detergente con pH neutro).

### Bracciale, Camera d'aria

Il bracciale può essere lavato a mano a 30° C. Prima di procedere al lavaggio togliere la camera d'aria. Tutte le superfici del bracciale, camera d'aria e tubo possono essere pulite/strofinate con un panno umido (acqua, detergente con pH neutro).

Per maggiori informazioni vedere quanto riportato sulle Istruzioni d'Uso.

## Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

## Garanzia

10 anni per difetti di fabbricazione.

## Accessori

Bracciale a 1 tubo, completo

Codice	Descrizione	Dimensioni (cm)	Circonferenza (cm)
<b>M-00.09.701</b>	Bambino piccolo	6 x 28	8 - 13
<b>M-00.09.703</b>	Bambino	10 x 34	13 - 20
<b>M-00.09.705</b>	Adulto piccolo	14 x 53	20 - 29

## INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

<b>M-00.09.629</b>	Adulto	14 x 58	29 – 41
<b>M-00.09.625</b>	Obeso / cosciale	20 x 86	>41

## Camera d'aria a 2 tubi

Codice	Descrizione	Dimensioni (cm)
<b>M-00.09.671</b>	Bambino piccolo	5 x 15
<b>M-00.09.673</b>	Bambino	8 x 20
<b>M-00.09.674</b>	Adulto piccolo	11 x 23
<b>M-00.09.675</b>	Adulto	12 x 28
<b>M-00.09.677</b>	Obeso / cosciale	18 x 52

## Tessuto per bracciali

Codice	Descrizione	Dimensioni (cm)
<b>M-00.09.059</b>	Bambino piccolo	6 x 28
<b>M-00.09.060</b>	Bambino	10 x 34
<b>M-00.09.061</b>	Adulto piccolo	14 x 53
<b>M-00.09.055</b>	Adulto	14 x 58
<b>M-00.09.057</b>	Obeso / cosciale	20 x 86