

FODERE PER MATERASSI

Ref. MA-12/14-FC

Ref. MA-12/14-FZ

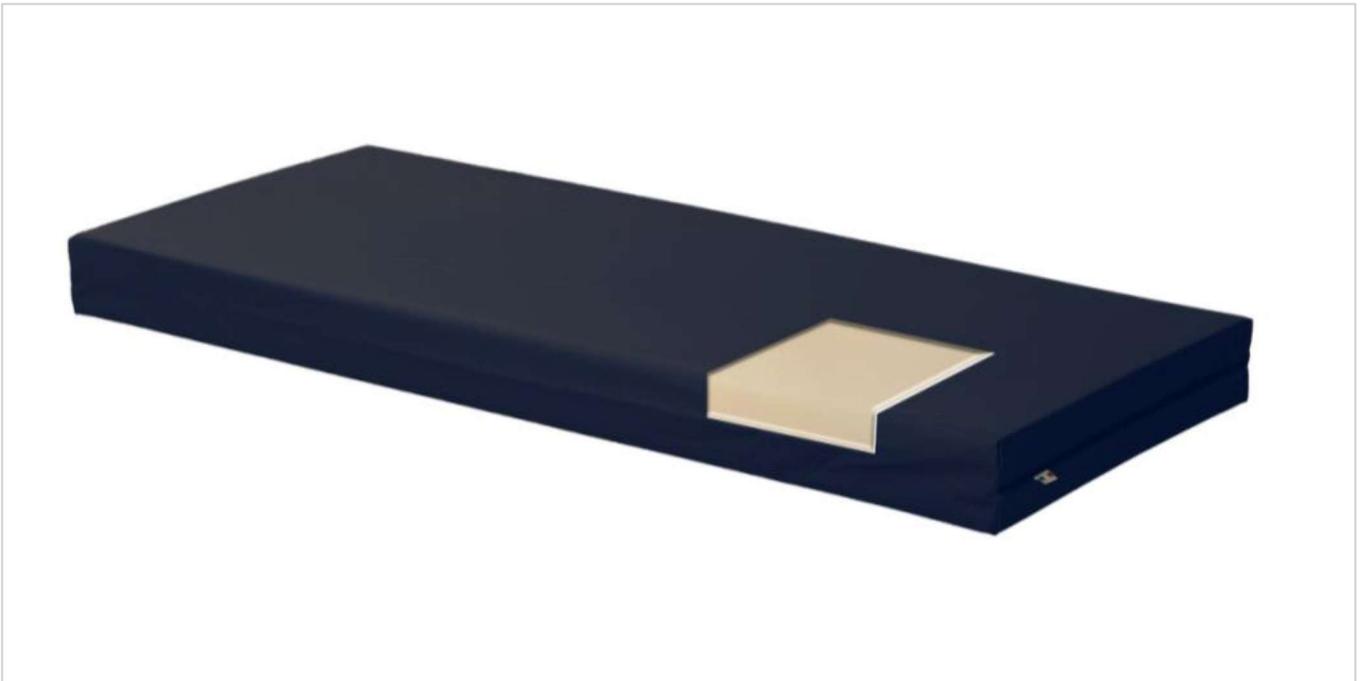


Foto con indicazione della fodera sul materasso, colore puramente indicativo.

Descrizione

Fodere per materassi MA-112 e MA-114, di colore blu in versione a cuffia o con chiusura a cerniera. Composte da un fondo antiscivolo realizzato in Poliestere con spalmatura in PVC per consentire un ancoraggio sicuro alla rete del letto, e da un telo superiore di copertura realizzato in Poliestere-Poliuretano, completamente privo di lattice e di ftalati, dotato di caratteristiche quali impermeabilità ai liquidi, traspirabilità al vapore acqueo e bielasticità. Quest'ultima proprietà consente di diminuire fortemente gli attriti superficiali tra cute e materasso.

Il telo superiore è inoltre caratterizzato dalla presenza, all'interno della propria microstruttura, di ioni di Argento, i quali possiedono note proprietà antibatteriche. Inoltre, tutti i test condotti hanno inoltre confermato l'assoluta a-tossicità del materiale sia a livello orale che dermico.

Entrambe le fodere abbinata ai materassi, sono facilmente rimovibili e sanificabili e sono certificate come resistenti al fuoco.

Destinazione d'uso

Fodere per materassi antidecubito.

Identificazione prodotto

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dispositivo Medico | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Codice CND | Y033399 | |
| Identificativo di Registrazione BD/RDM | In fase di registrazione | |
| Codice Nomenclatore Tariffario | nd | |
| Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Classe del dispositivo medico – 93/42/CEE | <input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III | |
| Marchatura CE | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Dichiarazione di Conformità del Fabbricante | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Ente Certificatore | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Sterile | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> n/a |
| Latex Free | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Anno immissione in commercio | 2019 | |
| Garanzia | 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura. | |
| Fabbricante | INTERMED S.r.l. | |
| Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP | n/a | |
| Distributore | INTERMED S.r.l. | |

Caratteristiche Tecniche

| | |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni | 195 x 85 cm |
| Composizione telo di copertura | Poliestere (45 %) / Poliuretano (55 %), integrato con ioni di Argento. Tessuto bielastico, traspirante, impermeabile, ignifugo, privo di lattice e ftalati. Peso totale: 220 ± 10 % [g/m ²] |
| Composizione fondo antiscivolo | Poliestere-PVC con proprietà batteriostatiche, fungistatiche e antimuffa, ignifugo, tessuto privo di formaldeide e ftalati. |
| Colore | Blu |
| Waterproofness - colonna d'acqua (EN ISO 811) | 3000 mm |
| Permeabilità al vapore acqueo (ASTM E96) | ≥ 600 g/m ² x 24h a 38°C |
| Reazione al fuoco cover superiore (BS 6807 - BS 7175) | Classe CRIB 5 |
| Azione antibatterica (ISO 22196) | Barriera permanente antimicotica e antibatterica |
| Sanificazione | Sanificabile in autoclave per 7 minuti a 134 °C. |

Informazioni utili**

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE | Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione del decubito, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che ne favoriscono l'insorgenza. |
| CONSERVAZIONE | Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. |
| MANUTENZIONE E PULIZIA |      - Lavare in lavatrice fino a 95°C (*) utilizzando un detergente idoneo non aggressivo abitualmente utilizzato negli ospedali. - Pulire strofinando la superficie con un panno morbido/una spugna non abrasivo imbevuto in acqua calda fino a 95°C (*) ed utilizzando un detergente idoneo non aggressivo abitualmente utilizzato negli ospedali. |
| MODALITÀ DI SMALTIMENTO | Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata. |

**Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

| COMPONENTE | DESCRIZIONE | PZ / CONFEZIONE |
|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| MA-12/14-Fx*** | Fodera per materassi antidecubito. | 1 |
| Manuale d'uso | Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo | 1 |

***Codice articolo variante a seconda della fodera scelta.

Accessori opzionali

| COMPONENTE | DESCRIZIONE | PZ / CONFEZIONE |
|------------|-------------|-----------------|
| nd | nd | nd |

Cronologia delle revisioni

| REV. | DATA | MODIFICA |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 0.0 | 25/06/2019 | Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito. |
| 0.1 | 11/07/2019 | Aggiornamento delle caratteristiche tecniche. |



Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.