

	SCHEMA TECNICA TUTORE POLSO	Rev 00 Luglio 2013
---	--	---

Misura	Codice	
	Destro	Sinistro
S	PL-005DS	PL-005SS
M	PL-005DM	PL-005SM
L	PL-005DL	PL-005SL



Indicazioni

- Distorsioni medie e gravi del polso.
- Degenerazione o lesioni delle articolazioni del polso.
- Infiammazioni.
- Fase post-ingessature.
- Tendiniti e tendinopatie del polso.

Descrizione

- Struttura chiusa con cinturino di chiusura palmo-dorsale.
- Stecca palmare in alluminio modellabile ed estraibile.
- Doppia stecca dorsale in plastica estraibile.
- Cinghie di stabilizzazione con sistema di chiusura a velcro.

Controindicazioni ed avvertenze

- Le indicazioni terapeutiche riportate non costituiscono, ovviamente, elenco esaustivo. Per ulteriori e più specifiche indicazioni fare sempre riferimento a valutazione del medico specialista.
- Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. In caso di reazioni allergiche, rivolgersi immediatamente al proprio medico curante.
- Il dispositivo medico deve essere impiegato a seguito di valutazione clinica effettuata da un medico specialista il quale, dopo la diagnosi, individuerà la misura e gli eventuali adattamenti nel rispetto delle caratteristiche morfologiche dell'arto del paziente. Tali adattamenti e la successiva applicazione del tutore devono avvenire a cura di personale tecnico specializzato.
- Si raccomanda di verificare con regolarità l'integrità del tutore e la tenuta dei sistemi di chiusura. Su indicazione ed a parere del medico specialista, effettuare controlli periodici per la verifica dell'efficacia funzionale del tutore.
- Si sconsiglia, per motivi di igiene ed efficacia terapeutica, il riutilizzo del tutore su altri pazienti.

TUTORE POLSO**Materiali componenti**

Imbottitura	Poliuretano
Tessuto interno	Cotone 80%, Poliammide 20%
Tessuto esterno	Poliammide
Cinghie	Polipropilene
Fibbie	Poliossimetilene
Stecche	Alluminio/materiale plastico

Dati tecnici

Modello	Circonferenza polso	Lunghezza
PL-005DS	<18 cm	23 cm
PL-005DM	da 18 a 22 cm	23 cm
PL-005DL	>22 cm	23 cm
PL-005SS	<18 cm	23 cm
PL-005SM	da 18 a 22 cm	23 cm
PL-005SL	>22 cm	23 cm

Modalità di lavaggio

Rimuovere le stecche in alluminio ed in plastica presenti all'interno del tutore e procedere al lavaggio secondo le seguenti indicazioni:

**Conservazione**

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Confezione 1 pezzo

Garanzia

Il dispositivo è coperto da garanzia di due anni per difetti di fabbricazione. La garanzia non comprende eventuali anomalie derivanti da utilizzo non idoneo. La garanzia non si applica in caso di riparazioni non autorizzate dal fabbricante ovvero nel caso di parti o componenti soggetti ad usura.

Produttore **INTERMED srl**

Codice CND **Y060612**
N. Repertorio **PL-005DS 1053897/R**
PL-005DM 1053898/R
PL-005DL 1053899/R
PL-005SS 1053900/R
PL-005SM 1053901/R
PL-005SL 1053902/R

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE