

TERMOFORO ELETTRICO DORSO/CERVICALE AVVOLGENTE

Ref. TC-006



Descrizione

Termoforo elettrico dorso/cervicale e coprispalle da 100 W, con le seguenti caratteristiche:

- Materiale: imbottitura in Pile di flanella super accogliente.
- Voltaggio: 220-240V.
- 3 impostazioni di temperatura con indicatore di livello.
- Spegnimento automatico dopo 90 minuti.
- Lavabile grazie al controller staccabile.
- Riscaldamento rapido e protezione da surriscaldamento.

Destinazione d'uso

Termoforo riscaldante avvolgente, indicato per trattamenti termici del dorso, della cervicale e delle spalle



Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	☐ SI	☒ NO
Conformità alla Direttiva europea 2014/35/UE	☒ SI	☐ NO
Conformità altri standard tecnici	IEC 60335-2-17 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013/A1:2019	
Marcatura CE	☒ SI	☐ NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	☒ SI	☐ NO
Ente Certificatore	☒ SI	☐ NO
Anno immissione in commercio	2021	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	BELLAVIE & SUNBRIGHT (Cina)	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Caratteristiche Tecniche

Potenza	100 W
Classe di protezione	Classe II
Regolazione Temperatura	Commutatore elettrico a 3 temperature: pos. 0 = Apparecchio spento pos. 1 = Calore minimo pos. 2 = Calore medio pos. 3 = Calore massimo
Alimentazione	220/240 V – 50/60 Hz
Dimensioni	60 x 90 cm

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Prima di procedere alla pulizia del termoforo, togliere la spina e lasciarlo raffreddare almeno dieci minuti. Il termoforo è dotato di un'unità di comando rimovibile. Separate l'unità di comando dal termoforo estraendo il cavo di collegamento dalla spina. Non utilizzare il termoforo se piegato o non ben disteso! Non inserire aghi nel termoforo! Non adatto per bambini con meno di 3anni! Utilizzare il termoforo esclusivamente in luoghi chiusi! Utilizzare di nuovo il termoforo solo una volta che è completamente asciutto.
--------------------------------	--

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

CONSERVAZIONE	Conservare il dispositivo in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Il termoforo può essere lavato al massimo a 30°C con ciclo di lavaggio delicato! Non usare candeggina! Il termoforo non deve essere asciugato in centrifuga! Il termoforo non deve essere stirato! Pulire il termoforo a secco (con una spazzola soffice) o secondo le indicazioni riportate sul manuale d'uso.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	L'apparecchio non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Ogni utilizzatore ha l'obbligo di gettare tutte le apparecchiature elettroniche o elettriche, contenenti o prive di sostanze nocive, presso un punto di raccolta della propria città o di un rivenditore specializzato, in modo che vengano smaltite nel rispetto delle normative in vigore in materia di tutela ambientale. Per lo smaltimento rivolgersi alle autorità comunali o al proprio rivenditore.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
TC-006	Termoforo elettrico avvolgente	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

Accessori opzionali/ricambi

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
TC-R01	Comando a filo	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
0.0	27/03/2021	Prima emissione della scheda tecnica

