

Misura	Codice
S	TS-002S
M	TS-002M
L	TS-002L



Indicazioni

- Immobilizzazione in caso di fratture clavicolari.
- Immobilizzazione in fase di cure post-operatorie.
- Immobilizzazione in caso di tendiniti, lussazioni e distorsioni.
- Immobilizzazione antalgica di braccio e avambraccio.

Descrizione

- Culla sagomata per l'alloggiamento dell'avambraccio.
- Cinghia di supporto regolabile con sistema a velcro provvista di proteggi-spalla imbottito.
- Fascia di immobilizzazione braccio-torace con sistema di chiusura a velcro.

Controindicazioni ed avvertenze

- Le indicazioni terapeutiche riportate non costituiscono, ovviamente, elenco esaustivo. Per ulteriori e più specifiche indicazioni fare sempre riferimento a valutazione del medico specialista.
- Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. In caso di reazioni allergiche, rivolgersi immediatamente al proprio medico curante.
- Il dispositivo medico deve essere impiegato a seguito di valutazione clinica effettuata da un medico specialista il quale, dopo la diagnosi, individuerà la misura e gli eventuali adattamenti nel rispetto delle caratteristiche morfologiche dell'arto del paziente. Tali adattamenti e la successiva applicazione del tutore devono avvenire a cura di personale tecnico specializzato.
- Si raccomanda di verificare con regolarità l'integrità del tutore e la tenuta dei sistemi di chiusura. Su indicazione ed a parere del medico specialista, effettuare controlli periodici per la verifica dell'efficacia funzionale del tutore.
- Si sconsiglia, per motivi di igiene ed efficacia terapeutica, il riutilizzo del tutore su altri pazienti.

Materiali componenti

Imbottitura	Poliuretano
Tessuto interno	Cotone 80%, Poliammide 20%
Tessuto esterno	Poliammide
Cinghia	Polipropilene

Dati tecnici

Modello	Dimensioni culla	Lunghezza fascia di immobilizzazione
TS-002S	35 x 12 cm	100 cm
TS-002M	35 x 14 cm	110 cm
TS-002L	35 x 18 cm	120 cm

Modalità di lavaggio**Conservazione**

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Confezione

1 pezzo

Garanzia

Il dispositivo è coperto da garanzia di due anni per difetti di fabbricazione. La garanzia non comprende eventuali anomalie derivanti da utilizzo non idoneo. La garanzia non si applica in caso di riparazioni non autorizzate dal fabbricante ovvero nel caso di parti o componenti soggetti ad usura.

Produttore

INTERMED srl

Codice CND

Y060624

N. Repertorio

TS-002S

TS-002M

TS-002L

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE