

	SCHEMA TECNICA IMMOBILIZZATORE CLAVICOLARE	Rev 00 Luglio 2013
---	---	---

Misura	Codice	Circonferenza
S	TS-003S	da 50 a 70 cm
M	TS-003M	da 70 a 90 cm
L	TS-003L	da 90 a 110 cm



Indicazioni

- Trattamento conservativo in caso di fratture composte e scomposte della clavicola.
- Terapia conservativa in caso di fratture clavicolari.
- Correzione posturale.

Descrizione

- Ancoraggio dorsale di forma triangolare per il raccordo del bretellaggio.
- Bretelle imbottite con cinghie di regolazione a velcro.

Controindicazioni ed avvertenze

- Le indicazioni terapeutiche riportate non costituiscono, ovviamente, elenco esaustivo. Per ulteriori e più specifiche indicazioni fare sempre riferimento a valutazione del medico specialista.
- Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. In caso di reazioni allergiche, rivolgersi immediatamente al proprio medico curante.
- Il dispositivo medico deve essere impiegato a seguito di valutazione clinica effettuata da un medico specialista il quale, dopo la diagnosi, individuerà la misura e gli eventuali adattamenti nel rispetto delle caratteristiche morfologiche dell'arto del paziente. Tali adattamenti e la successiva applicazione dell'immobilizzatore devono avvenire a cura di personale tecnico specializzato.
- Si raccomanda di verificare con regolarità l'integrità dell'immobilizzatore e la tenuta dei sistemi di chiusura. Su indicazione ed a parere del medico specialista, effettuare controlli periodici per la verifica dell'efficacia funzionale dell'immobilizzatore.
- Si sconsiglia, per motivi di igiene ed efficacia terapeutica, il riutilizzo dell'immobilizzatore su altri pazienti.

Materiali componenti

Imbottitura	Poliuretano
Tessuto interno	Cotone 80%, Poliammide 20%
Tessuto esterno	Poliammide
Ancoraggio	Skay
Cinghie	Polipropilene

Modalità di lavaggio



Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Confezione

1 pezzo

Garanzia

Il dispositivo è coperto da garanzia di due anni per difetti di fabbricazione. La garanzia non comprende eventuali anomalie derivanti da utilizzo non idoneo. La garanzia non si applica in caso di riparazioni non autorizzate dal fabbricante ovvero nel caso di parti o componenti soggetti ad usura.

Produttore

INTERMED srl

Codice CND

Y060621

N. Repertorio

TS-003S

TS-003M

TS-003L

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE