

**SUPPORTO CLAVICOLARE
CON RICHIAMO POSTURALE**

Misura	Codice
S	TS-005S
M	TS-005M
L	TS-005L

**Indicazioni**

- Correzione posturale.
- Riduzione del carico dorsale.

Descrizione

- Supporto clavicolare realizzato in materiale elastico leggero e traspirante onde garantire il massimo comfort per il paziente
- Fascia dorsale con stecche estraibili a spirale.
- Fascia addominale con sistema di chiusura anteriore a velcro.
- Doppia bretella di supporto clavicolare con sistema di chiusura a velcro.

Controindicazioni ed avvertenze

- Le indicazioni terapeutiche riportate non costituiscono, ovviamente, elenco esaustivo. Per ulteriori e più specifiche indicazioni fare sempre riferimento a valutazione del medico specialista.
- Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. In caso di reazioni allergiche, rivolgersi immediatamente al proprio medico curante.

**SUPPORTO CLAVICOLARE
CON RICHIAMO POSTURALE**

- Il dispositivo medico deve essere impiegato a seguito di valutazione clinica effettuata da un medico specialista il quale, dopo la diagnosi, individuerà la misura e gli eventuali adattamenti nel rispetto delle caratteristiche morfologiche dell'arto del paziente. Tali adattamenti e la successiva applicazione del supporto devono avvenire a cura di personale tecnico specializzato.
- Si raccomanda di verificare con regolarità l'integrità del supporto e la tenuta dei sistemi di chiusura. Su indicazione ed a parere del medico specialista, effettuare controlli periodici per la verifica dell'efficacia funzionale del supporto.
- Si sconsiglia, per motivi di igiene ed efficacia terapeutica, il riutilizzo del supporto su altri pazienti.

Materiali componenti

Lattice naturale 55%, Poliammide 28%, Poliestere 17%.

Dati tecnici

Codice	Circonferenza vita
TS-005S	da 65 a 80 cm
TS-005M	da 75 a 90 cm
TS-005L	da 85 a 100 cm

Modalità di lavaggio

Rimuovere le stecche in alluminio ed in plastica presenti all'interno del tutore e procedere al lavaggio secondo le seguenti indicazioni:

**Conservazione**

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Confezione 1 pezzo

Garanzia Il dispositivo è coperto da garanzia di due anni per difetti di fabbricazione. La garanzia non comprende eventuali anomalie derivanti da utilizzo non idoneo. La garanzia non si applica in caso di riparazioni non autorizzate dal fabbricante ovvero nel caso di parti o componenti soggetti ad usura.

Produttore **INTERMED srl**

Codice CND **Y060621**
N. Repertorio **TS-005S**
TS-005M
TS-005L

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE